

- Chaque jeu d'aligners est conçu pour être remplacé après environ 2 semaines à raison de 0-22 heures de port par jour (-300 heures par aligner).
- Placez l'aligner n°1 sur les dents du patient et vérifiez visuellement que les tissus mous ne sont pas pincés. Si nécessaire, coupez les aligners. Après le découpage des aligners, polissez les avec les EZ-Trim™ Polishing Wheels (ou produit similaire).
- Collez les taquets; effectuez la réduction interproximale nécessaire (RIP) en utilisant le Kit de Réduction Interproximale Invisalign (ou produit similaire).
- Ajoutez les pontiques aux aligners, le cas échéant, en utilisant Le Système de Pontique Invisalign (ou produit similaire).
- Remettez au patient une boîte de rangement Invisalign. Expliquez au client qu'il doit conserver les aligners dans la boîte lorsqu'il ne les porte pas pour éviter de les perdre ou de les endommager.
- À chaque rendez-vous, vérifiez les contacts interproximaux serrés et, si nécessaire, exécutez la RIP comme prescrite. Vérifiez l'étape des aligners et leur adaptabilité et consultez le ClinCheck pour contrôler le progrès du traitement.
- Remettez au patient le jeu d'aligners de l'étape suivante. Le patient doit avoir un nombre suffisant d'aligners jusqu'au rendez-vous suivant.
- Si des aligners supplémentaires sont nécessaires, de nouvelles empreintes peuvent être exigées.
- En fin de traitement, le port d'aligners de contention est fortement recommandé.
- Pour d'autres détails de procédure, consultez le matériel de formation Invisalign.

ENTRETIEN QUOTIDIEN DE VOS ALIGNERS INVISALIGN

- Les aligners doivent être nettoyés avant de les mettre en bouche en utilisant une brosse à dent avec de l'eau et éventuellement un peu de dentifrice.
Note: Rincez soigneusement chaque aligner sous l'eau après chaque nettoyage. Nous vous recommandons également d'utiliser un système de nettoyage pour vos aligners Invisalign une fois par semaine, ou selon vos besoins.
- NE PAS utiliser de produits pour prothèses dentaires ou de bain de bouche pour nettoyer vos aligners. Ces produits peuvent endommager la surface des aligners, altérant leur teinte et les rendant ainsi invisibles.

UNE BONNE HYGIÈNE BUCCALE

- Les aligners doivent toujours être enlevés avant de manger ou boire (sauf pour boire de l'eau fraîche).
- Le patient doit se brosser les dents et passer du fil dentaire après chaque repas ou en-cas avant de remettre ses aligners. S'il ne peut pas utiliser de système de nettoyage ou se brosser les dents, il peut simplement se rincer la bouche, et nettoyer ses aligners à l'eau tiède du robinet. Ce n'est pas la meilleure manière de les nettoyer, mais cela fonctionne en dépannage. Les aligners doivent ensuite être nettoyés correctement dès que possible.
- Si les patients ont des questions concernant leur hygiène buccale, ils doivent consulter leur praticien.
- Des contrôles dentaires et un nettoyage réguliers sont recommandés pour préserver la santé des dents et des gencives.

LIVRAISON

Chaque aligner est nettoyé, et emballé avant la livraison. Chaque aligner comporte le logo Invisalign et un numéro identifiant le numéro de traitement du patient ainsi que l'étape de traitement.

Uniquement destiné à un usage dentaire professionnel.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

Symbole	Titre	Texte explicatif	Norme/ Référence
	Consultez le mode d'emploi	Indique que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi.	EN ISO 15223-1* 5.4.3
	Attention	Indique que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi afin de lire les informations importantes telles que les avertissements et les mises en garde qui ne peuvent pas être approuvés sur l'appareil médical lui-même pour diverses raisons.	EN ISO 15223-1, 5.4.4
	Numéro du patient	Indique un numéro unique associé à un patient individuel.	EN ISO 15223-3, 5.7.1
	Fabricant	Indique le fabricant de l'appareil médical, comme défini dans la directive européenne 93/42/CEE.	EN ISO 15223-4, 5.11
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.	EN ISO 15223-4, 5.12
	Sur prescription uniquement	Attention : la Loi fédérale des États-Unis restreint la vente de ce dispositif à la vente par ou pour le compte d'un professionnel dentaire agréé.	US Code of Federal Regulations, Title 21, Part 801.10(c)(1)(i)(F)

*Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux - Partie 1 : Exigences générales.

Invisalign et ClinCheck sont des marques déposées d'Align Technology, Inc.